

REF

HGCG134S0101(1T/Kit)
HGCG134S0105(5T/Kit)
HGCG134S0120 (20T/Kit)
HGCG134S0140(40T/Kit)



PROBEENTNAHME



Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
sollten von einem Erwachsenen
unterstützt werden.

VERPACKUNGSIHALT



Gebrauchsanweisung



SARS-CoV-2
antigen test kassette



Röhrchen mit
Extraktionslösung



Müllbeutel für
Gefahrstoffe



Steriler Einwegtupfer
für Probenentnahme

DURCHFÜHRUNG

1

Waschen und trocknen Sie
sich die Hände gründlich,
bevor Sie den Test
durchführen.



2

Lesen Sie die gesamte
Gebrauchsanweisung
sorgfältig durch, bevor
Sie mit dem Test
beginnen.



3

Bitte scannen Sie den QR
Code um das
Anwendungsvideo
ansehen zu können.




4



Ziehen Sie die Tupferverpackung
auf der Seite des Stiels auf und
entnehmen Sie den Tupfer.
VORSICHT! Die textile Spitze des
Tupfers nicht berühren.

5

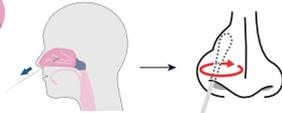

Den Tupfer 1,5 cm vorsichtig in ein Nasenloch
führen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.
Mindestens 15 Sekunden mit leichtem Druck
4-6-mal entlang der Nasenwand drehen.

6

Diesen Vorgang im anderen
Nasenloch wiederholen.




7



Die farbige Kappe des Röhrchens
öffnen und den Tupfer mit der Probe in
das Röhrchen tauchen.

8

Den Tupfer darin min. 15 Sek.
einwirken lassen, dabei mehrfach
drehen und 3 mal ausdrücken.

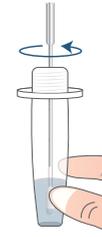

9

Bei der Entnahme des Tupfers das
Röhrchen leicht zusammendrücken.

10

Das Röhrchen wieder mit dem
farbigen Deckel verschließen.




11



Den Beutel mit der
Testkassette öffnen,
diese herausnehmen
und auf einen flachen
Untergrund legen.

12

Die durchsichtige Kappe
des Röhrchens öffnen
und 4 Tropfen in die
Öffnung "S" der
Testkassette geben.

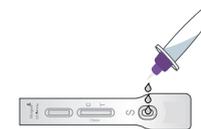

13



Das Ergebnis kann nach 15 Min.
abgelesen werden. Nach 30 Min.
ist das Ergebnis ungültig.

14

Entsorgen Sie nach der
Durchführung alle verwendeten
Komponenten des Tests in den
Biohazard-Abfallbeutel.
Verschließen Sie den Beutel und
entsorgen Sie diesen in den
Restmüll. Die Komponenten sind
nicht wieder verwendbar.




15

Desinfizieren oder waschen Sie
sich die Hände gründlich,
nachdem Sie den Test
durchgeführt haben.

ERLÄUTERUNG DES TESTERGEBNISSES

Abb. 1

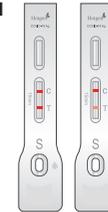

Positiv

Positiv: Erscheinen zwei
rote/rosafarbene Linien
an der C-Linie und an
der T-Linie, ist das
Ergebnis positiv und es
besteht der Verdacht auf
eine COVID-19 Infektion.


Abb. 2



Negativ

Negativ: Erscheint nur eine
rote / rosafarbene Linie an
der C-Linie, ist das
Testergebnis negativ oder
die Viruslast liegt unter der
Nachweisgrenze des Tests.

Abb. 3

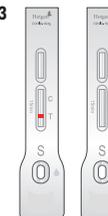

Ungültig

Ungültig: Der Test ist
ungültig, wenn an der
C-Linie keine Farblinie
erscheint. Möglicherweise
wurde der Test nicht korrekt
durchgeführt. Der Test muss
mit einem neuen Test Kit
wiederholt werden. Bei der
Durchführung an die
Gebrauchsanweisung halten.